

1. 제 품 명 : 목견인운동의료기
2. 모 델 명 : 슈마DA-100(가정용문틀형)
3. 품목신고번호 : 서울 제신11-68호

4. 사 양
 - 가. 규 격 : 760mm ~ 1,050mm(W)
 - 나. 중 량 : 3.4kg

5. 사용 대상자
 - 가. 목 디스크로 고생하시는 분
 - 나. 지속적인 목 통증이 있으신 분
 - 다. 어깨 결림과 팔 저림으로 고생하시는 분(오십견)
 - 라. 어깨, 등 뒤 앞가슴으로 내려가는 방사통이 있으신 분
 - 마. 손의 감각 이상(무딘 감각, 예민한 감각)이 있을 때
 - 바. 통증이 없는데 어깨를 들어 올릴 수 없을 때
 - 사. 가정 또는 업소용(병의원, 한의원, 재활물리치료실, 스포츠 클리닉, 센터 등)



6. 특징점
 - 가. 가정에서 문틀에 장착하여 간편하게 사용할 수 있다.(문틀폭 80cm이상)
 - 나. 남녀노소, 환자, 건강인 누구나 사용할 수 있도록 제작되었다.
 - 가. 상부 탄력밴드는(Tension) 수축이완의 반복작용으로 탈출된 디스크 수핵이 제자리로 돌아가게 합니다.
 - 나. 견인 후 통증이 사라지면 경부운동을 동시에 할 수 있습니다.
 - 다. 환자의 상태에 따라 조절견인이 가능하며 강제적인 견인이 아니므로 부작용이 없습니다.
 - 라. 10분 내외의 적은 시간으로도 효과가 빠르게 나타납니다.
 - 마. 다양한 운동방법과 안전하고 무리하지 않는 자연스러운 견인 운동법입니다.

7. 제품 구성
 - 가. 목현수기
 - 나. 탄력밴드
 - 다. 현수기거치대
 - 라. 문틀용 고정철봉
 - 마. 사용설명서



- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 문틀고정용 안전핀 문틀 양쪽에 안전핀을 고정시킵니다. 철봉 고무 홈을 안전핀에 끼워서 단단히 조여줍니다. 철봉에 매달려서 고정 상태가 안전인지 확인한 후 사용합니다. | <ul style="list-style-type: none"> 안전핀 자석 - 탄력밴드 세트 위 상고리가 철봉에서 빠지지 않도록 안전핀을 반드시 꽂은 후 사용합니다. - 자석은 안전핀 분실방지 용도입니다. |
|---|--|

