

1. 제 품 명 : 목견인운동의료기
2. 모 델 명 : 슈마DA-1200(경추전용)
3. 품목신고번호 : 서울 제신12-301호
4. 사양
가. 규 격 : 680(W) x 900(D) x 2080(H)
나. 중 량 : 26kg



5. 사용 대상자
가. 목 디스크로 고생하시는 분
나. 지속적인 목 통증이 있으신 분
다. 어깨 결림과 팔 저림으로 고생하시는 분(오십견)
라. 어깨, 등 뒤 앞가슴으로 내려가는 방사통이 있으신 분
마. 손의 감각 이상(무딘 감각, 예민한 감각)이 있을 때
바. 통증이 없는데 어깨를 들어 올릴 수 없을 때
사. 가정 또는 업소용(병의원, 한의원, 재활물리치료실, 스포츠클리닉센터 등)
6. 특징점
가. 상부 탄력밴드는(Tension) 수축이완의 반복작용으로 탈출된 디스크 수핵이 제자리로 돌아가게 합니다.
나. 견인 후 통증이 사라지면 경부운동을 동시에 할 수 있습니다.
다. 환자의 상태에 따라 조절견인이 가능하며 강제적인 견인이 아니므로 부작용이 없습니다.
라. 10분 내외의 적은 시간으로도 효과가 빠르게 나타납니다.
마. 다양한 운동방법과 안전하고 무리하지 않는 자연스러운 견인 운동법입니다.

7. 제품 구성
가. 목현수기
나. 탄력밴드셋트
다. 철봉(높이조절가능)
라. 의자셋트
마. 경추전용 기구셋트
바. 사용설명서



8. 제품 명칭



9. 취급(운동) 시 주의사항

- 제품을 문틀에서 움직이지 않도록 주의하십시오.
- 노약자나 어린이에게 사용하지 마십시오.
- 환자의 상태에 따라 견인 높이를 조절해 주십시오.
- 개조하거나 수리하지 마시고 판매점이나 당사로 연락하십시오.
- 다음과 같은 사람은 의사와 상담후에 사용하십시오.
 - ▶ 의사의 치료를 받고 있는 사람이나 특히 신체의 이상을 느낄때.
 - ▶ 악성종양이 있는 사람
 - ▶ 심장에 장애를 갖고 있는 사람
 - ▶ 생리중이나 임신중인 사람
 - ▶ 안 정이 필요한 사람
 - ▶ 열이 높은 사람(38도 이상)
 - ▶ 골다공증이 있는 사람
- 골절 등을 수술하여 일정기간이 경과하지 않은 환자는 사용을 금한다.
- 다른 치료품과 동시에 사용을 금한다.
- 중증환자는 보호자를 동반하여 운동하시길 권합니다.